

Provtagningsanvisning Chylotorax- Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Gävleborg (skriv för hand under övriga analyser)
Provtagning	Plasma (Triglycerider och Kolesterol): Li-Heparin, gelrör, mintgrön propp  Pleura (Triglycerider och Kolesterol): Na- eller Li-Heparinrör utan gel, grön propp 
Förvaring/Transport	Centrifugera provet inom 4 timmar från provtagning Centrifugerat prov hållbart 7 dygn i kyl 3 månader i frys (-20 °C)
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Dagligen
Ackrediterad	Plasmaanalyser Ackrediterad Pleuraanalyser Ej ackrediterad
Efterbeställning	I undantagsfall inom 4 timmar
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobank	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Triglycerider och Kolesterol analyseras på både plasma och pleura vid samma provtillfälle
Medicinsk bakgrund/Indikation	Vid misstänkt lymfdränage till pleurautrymmet

Revideringar

Datum	Revisions nr	Ändring
2022-06-01	5	Lagt till rubriken Revideringar.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet