

Provtagningsanvisning Sporprov (sterilitetskontroll) - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Pappersremiss, Remiss 2 Mikrobiologi Laboratoriemedicin Region Gävleborg
Provtagning	Provtagningskit: - Sporview Self-contained Biological Indicators For monitoring Steam/SporView Steam Self-contained BI (Crosstex, SCS-100): <i>Geobacillus stearothermophilus</i> - Ampull för ångautoklav - Biological Indicator Spore Strips For Monitoring Dry Heat (Crosstex, BG-106): <i>Bacillus atrophaeus</i> - Strips för torrsterilisator (OBS! Förvaras torrt och mörkt mellan 15 och 30 grader) Provtagningsförfarande: • Placera ampuller/stripsen i sterilisator på ställen som är svåra att sterilisera (enligt valideringsprotokollet eller lokala skriftliga rutinen). Packa på samma sätt som övriga gods (ex inuti dukarna, linda in i papper, direkt, m m). • Ta EJ isär varken ampullerna eller stripsen! • Kör steriliseringsprogrammet enligt sedvanliga rutinerna. • Ta ut ampullerna/stripsen, låt dem svalna lite. Tryck INTE ner korken på ampullerna. • Kryssa i på remissen där det står sporprover, längst ner i högra hörnet under Sterilkontroller och klistra motsvarande etikett som heter SE och sitter på baksidan av remissen på proverna. • Inga personnummer behövs ges på remissen utan det räcker med avsändare, beställare och deras adress inklusive telefonnummer och datum. • Har man fler än en ampull/strips så numrera gärna ampullerna/stripsen och autoklavbeteckning på remissen under klinisk data t.ex. Nr. 1 längst in och Nr. 2 längst ut osv. • Proverna skickas till Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin, Region Gävleborg, 801 87 Gävle.

Förvaring i väntan på transport	• Stripsar (torrsterilisator) förvaras i rumstemperatur. • Ampullerna förvaras i kyl eller i rumstemperatur inför transport.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk mikrobiologi
Referensintervall	Sterilt - osterilt
Svarstid	Osterila prover meddelas per telefon till kunden och besvaras omgående. Ange gärna telefonnummer på remissens kliniska data.
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Provet kan efterbeställas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Ange gärna - instrumentets ID-nummer samt steriliseringsmetod (ex torrvärme, ånga, osv) - ampull-/stripsnummer om flera sporprover tas - telefonnummer och datum - om det är en validering som pågår eller kontroll på remissens kliniska data.
Medicinsk bakgrund/indikation	Biologisk kontroll av steriliseringsprocesser som en del i SIS-TR 46:2014.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2022-06-27	7	Lagt till rubrik revideringar.
2022-12-13	8	Ny fastställare. Revidering av hela anvisningen.